

BEPHY

DE

Bephy Kondome sind aus hochwertigem Naturkautschuklatex, haben eine glatte Oberfläche, und eine natürliche Farbe, Sie haben ein Reservoir und sind mit einem nicht-medizinischem Gleitmittel befeuchtet. Bei sachgerechter Verwendung in Übereinstimmung mit der Anleitung des Herstellers sind Kondome eine wirksame Form zur Empfängnisverhütung. Allerdings können Kondome keinen 100% igen Schutz vor Schwangerschaft bieten. Bei richtiger Anwendung, können Latexkondome helfen, das Risiko der Übertragung von HIV-Infektionen (AIDS) zu reduzieren, sowie viele andere sexuell übertragbare Krankheiten, einschließlich Chlamydien-Infektion, Genital-Herpes, Genitalien Warzen, Gonorrhoe, Hepatitis B und Syphilis. Normale Weite: 56 ± 2 mm.

Zur Beachtung:

- Das Kondom ist nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie keine Gleitmittel auf Ölbasis, wie z. B. Vaseline, Massageöl, Babyöl, Körperlotion, Butter, etc. diese können das Kondom beschädigen. So können auch einige Medikamente, die auf Penis oder Vagina angewendet werden das Kondom beschädigen konsultieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie diese Medikamente mit Kondomen zu verwenden.
- Wenn bei Ihnen Irritationen auftreten, beenden Sie die Verwendung der Latexkondome und fragen Sie ihren Arzt .
- Bitte suchen Sie ärztlichen Rat, mindestens innerhalb von 72 Stunden, sollte ein Kondom beschädigt sein oder während des Gebrauchs reißen.
- Sollte die Folie beschädigt sein, entsorgen Sie bitte das Kondom.
- Kondome kühl und trocken lagern und vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Achten Sie darauf das das Kondom nicht abrutscht und überprüfen, Sie den richtigen Sitz.

Gebrauchsanweisung:

SCHRITT 1: Überprüfen Sie das Verfallsdatum vor der Benutzung, öffne Sie auf der Seite die Folie.

Das Kondom vorsichtig aus der Folie nehmen und achten Sie darauf es nicht durch Fingernägel, Schmuck etc. zu beschädigen.


SCHRITT 2: Setzen Sie das Kondom auf den Penis auf auf, nachdem dieser vollständig errigiert ist, und achten Sie auf die Abrollrichtung damit das Kondom eng anliegt und sich keine Luft im Reservoir befindet, eine sachgerechte Benutzung hilft Ihnen und Ihrem Partner Schwangerschaft und Übertragung von STI zu verhindern.

Ein Kondom, könnte beim unsachgemäßen anlegen beschädigt werden, um dies zu vermeiden stellen Sie sicher das der Rollrand auf der Außenseite plaziert ist und rollen das Kondom über den errigierten Penis ab. Halten Sie das Kondom am Reservoir fest und rollen Sie es über den Penis ab.

SCHRITT 3: Nach der Ejakulation halten Sie das Kondom fest und ziehen Sie den Penis aus der Vagina während der Penis noch errigiert ist.

SCHRITT 4: Das benutzte Kondom bitte im Müll und nicht in der Toilette entsorgen.

Achtung: Dieses Kondom besteht aus Naturkautschuklatex, die allergische Reaktionen hervorrufen können. Wenn der Benutzer allergisch auf Latex reagiert.

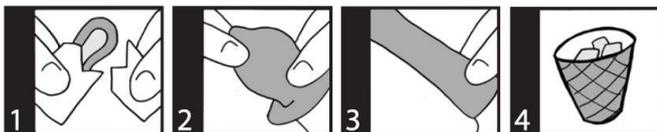

ASHA International
Seinhuiswachter 1-3, 3034 KH
Rotterdam, The Netherlands

Standard EN ISO 4074:2015
100% Electronically Tested
Nominal Width: 56 ± 2mm

8-7-2019